

tiptoe naildrops®

LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U TIPTOE NAILDROPS GEBRUIKT

Wat is tiptoe naildrops®?

tiptoe naildrops is een heldere, kleurloze vloeistof in een glazen flesje voorzien van een druppelaar om het aanbrengen op de nagel te vergemakkelijken. **tiptoe naildrops®** bevat geen conserveermiddelen en parfum. De bestanddelen zijn volledig biologisch afbreekbaar.

Beoogd doel: Deze nagellotion is een hulpmiddel met een werkzame stof die is gebaseerd op lichaamseigen aminozuren. Het is een gepatenteerde bio-actieve lotion, die met een handige pipet kan worden gedoseerd. De nagellotion is bedoeld voor de behandeling en preventie van infecties aan de nagels (Onychomycose) van voeten en / of handen. Deze nagellotion werkt op basis van een drieledige aanpak: 1) een oplossing die de schimmel direct aanpakt waar de nagel groeit en 2) het stimuleert het herstellend vermogen van de huid rondom de nagelriem, daar waar de nagel ontstaat en 3) op de nagel vormt zich een klein beschermend laagje wat voorkomt dat andere nagels ook besmet worden.

Doelgroep en indicaties: Deze nagellotion kan door volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar (onder toezicht) worden gebruikt bij symptomen van een schimmelinfectie aan de nagel: zichtbare nagelschade zoals verdikkingen en vervormingen, verkleuringen (bijv. geel, bruin of zwart), afzettingen, loslaten, broosheid of inscheuren van de nagel, en verkleuringen en veranderingen van de huisstructuur rond de nagel. Bij een kalknagel kan het om een infectie gaan waarbij schimmels, gisten, bacteriën enz. zich in de keratine van de aangetaste nagel kunnen bevinden. Hoewel een kalknagel vaak als een cosmetisch probleem wordt beschouwd, is het een infectie van de nagel die zonder behandeling ook op andere nagels kan overslaan. Er kan sprake zijn van (druk) pijn en de nagel kan ook geheel loskomen. Raadpleeg uw arts als u het niet zeker weet of het om een kalknagel (Onychomycose) gaat.

Inhoud en gebruik van het product: 10 mL oplossing in fles met handig doseerbare pipet. Met het gebruik kan al worden gestart vanaf de eerste symptomen van een schimmelinfectie.

Voor gebruik kunt u het beste eventuele nagellak verwijderen en de nagel met een wegwerpvijl voorbehandelen (eventueel ook wegnippen van de aangedane stukken). De schaar en de vijl daarna grondig reinigen met bijvoorbeeld alcohol of een ontsmettingsmiddel.

Nog beter is het om uw aangedane nagels vooraf door een (medisch) pedicure te laten behandelen.

Gebruik de oplossing als volgt: Breng **tiptoe naildrops®** tweemaal daags op de aangedane nagel en nagelriem aan, bij voorkeur 's ochtends en 's avonds. Houd de punt van de druppelaar boven de nagel. Vermijd direct contact met de besmette nagel om de vloeistof schoon te houden. Knijp zacht in de pipet en laat de druppel vallen. Bedek de nagel en nagelbed met een dunne laag van de oplossing. Het is belangrijk dat de oplossing ook onder de rand (nagelbed) van de aangedane nagel wordt aangebracht. Laat de nagel na het aanbrengen enkele minuten drogen. De behandelduur varieert afhankelijk van de ernst van de infectie, in veel gevallen kan 3-6 maanden behandeling noodzakelijk zijn. Zet voor optimale resultaten de behandeling voort tot een nieuwe gezonde nagel volledig is uitgegroeid. Gebruik tijdens de behandeling geen nagellak omdat **tiptoe naildrops®** hierdoor minder goed werkt.

De eerste verbetering is te zien na enkele weken. Dit is zichtbaar door herkenning van verandering aan de huid rondom de nagel. De nagel en huid worden soepel en zacht. Een nagel heeft doorgaans een jaar nodig om volledig uit te groeien. De periode is afhankelijk van uw persoonlijke nagelgroei die kan variëren per persoon. Aangeraden wordt om dit proces te laten volgen door uw persoonlijke pedicure. Raadpleeg een arts indien u na 3-6 maanden gebruik geen vermindering van uw kalknagelsymptomen op huid en nagels kunt vaststellen.

Waarschuwingen:

- Lees de gebruiksaanwijzing van het product voor het eerste gebruik goed door
- Product is uitsluitend geschikt voor lokaal, uitwendig gebruik
- Contact met de ogen en slijmvliezen voorkomen. Bij contact onmiddellijk met veel water uitspoelen.
- Houd het product uit de buurt van kinderen
- Gebruik het product niet op open wonden
- Gebruik het product niet als de houdbaarheidsdatum is verstreken
- Gebruik het product niet als u allergisch bent voor een van de werkzame stoffen of als u overgevoelig reageert op een van de ingrediënten in het product.
- De werking van het product is alleen plaatselijk en kan daarom door diabetici worden gebruikt.
- Voor gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding raden wij u aan een arts te raadplegen.
- Als u nog vragen heeft of als de symptomen niet verminderen of erger worden, dient u een arts te raadplegen.



Bewaren : bewaren tussen 2°C en 25°C. Beschermen tegen direct zonlicht en vorst.

Ingrediënten : Aqua, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Disodium Phosphate, Potassium Phosphate, Potassium Chloride, sh-Oligopeptide-11, Acetic Acid.



Houdbaarheid : na opening nog 3 maanden houdbaar.



Fabrikant : tiptoe B.V., Kanaalweg 33, 2903 LR Capelle aan den IJssel, Nederland.
E-mail: info@tiptoe.eu. **tiptoe naildrops**© is een gedeponeerd handelsmerk.

Verpakkingsinhoud: oplossing 10 mL

Publicatiedatum gebruiksaanwijzing: 29-10-2022

Tips voor een effectieve behandeling om de effectiviteit van tiptoe producten te vergroten

- Droog handen en voeten na het wassen zeer goed af, ook tussen de tenen en vingers.
- Houd nagels kort en voorkom nagelbijten, dit maakt nagels kwetsbaar voor infecties.
- Wissel regelmatig (elke dag) van schoenen, tussentijds goed luchten of drogen, vermijd het continu dragen van sport- of kunstleren schoenen. Draag schoenen die goed passen, die niet te krap of te smal zijn zodat uw voeten goed kunnen ademen.
- Draag elke dag schone sokken, bij voorkeur vocht opnemende (katoen).
- Draag slippers op plaatsen die collectief worden gebruikt (zwembaden, kleedkamers, enz.)
- Gebruik bij een schimmelinfectie van de huid ook de andere producten van tiptoe zoals de **tiptoe care foam**, **tiptoe protect your feet** en **tiptoe clean your shoes** voor een optimale behandeling.

Meer informatie vindt u op de website van tiptoe: www.tiptoe.eu